

Importante

*Imagens meramente ilustrativas

O presente documento serve apenas para simplificar e clarificar os passos para o correto funcionamento do equipamento. **No entanto, continua a ser crucial a leitura do manual do usuário.** Caso necessário, solicite a versão impressa ou por meio eletrônico (e-mail, WhatsApp, entre outros).

Manual

Baixe a versão mais recente do manual diretamente no site da Quark Medical:

quarkmedical.com.br/pdf/PROSEVEN.pdf



OBS: A leitura do manual do usuário é imprescindível para boas práticas de uso.

Atenção

Certifique-se que não há divergências nos acessórios que compõem o equipamento, verificando o checklist (disposto na parte interna da embalagem)

Instruções Gerais para Uso

1- A utilização do equipamento somente deve ser feita pelo Fisioterapeuta ou por profissional treinado e orientado por ele.

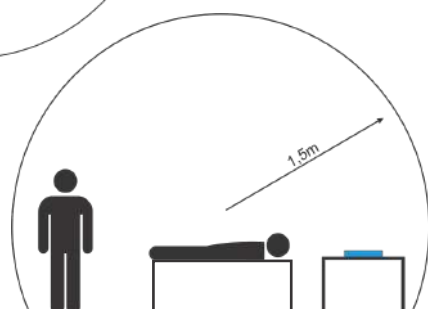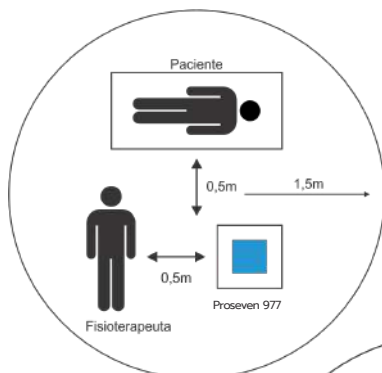

2- Conecte o cabo do cabeçote emissor no conector de saída do equipamento.







3- Conecte o cabo de força no equipamento e o plug na tomada da rede elétrica. Não há necessidade de verificar a tensão da rede elétrica (117V ou 220V), pois o equipamento fará a seleção da voltagem automaticamente.




4- Ligue o equipamento através da chave Liga/Desliga. A mensagem com o nome do equipamento e revisão do software aparece no display. Durante este processo, ouve-se o som da campainha.



5- Selecione uma terapia pré-programada, segundo a tabela de programas das páginas **11** e **12** do manual do usuário, ou selecione os parâmetros a seu critério.

***Opção 1 (Automático)** - Selecione o programa de terapia desejado, pressionando a tecla **Programa** e depois as teclas   **Programa**.
Pule para o item **7**.

***Opção 2 (Manual)** - Selecione através das teclas  (% Freq) e  (Envelop) os parâmetros desejados.

6- Ajuste o tempo de terapia, pressionando a tecla  (Tempo) e depois as teclas  .

7- Aplique o gel para acoplamento na área de alumínio do cabeçote emissor.



8- Inicie a terapia pressionando a tecla **INICIAR TERAPIA** (Iniciar Terapia).

9- Eleve a intensidade de emissão de ultra-som até a potência desejada, pressionando a tecla **Controle de Intensidade** (Controle de Intensidade).

10- Para interromper a terapia a qualquer momento antes do tempo programado, pressione a tecla **PARAR TERAPIA** (Parar terapia).



2- Para colocar e retirar o cabeçote, deve-se movimentá-lo no sentido horizontal, não para cima e nem para baixo, pois o suporte pode sair.



Montagem e Utilização do Suporte

1- O suporte deverá ser encaixado na lateral do equipamento, colocando o mesmo de cima para baixo.



Fabricante: Quark Produtos Médicos
Razão Social: Mendes e Barbosa
Produtos Médicos

Indústria Brasileira
CNPJ: 71.769.673/0001-59
Número ANVISA: 80079190024

Rua do Rosário, 1776 - Centro -
Piracicaba/SP
CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800

www.quarkmedical.com.br
quark@quarkmedical.com.br