

Manual de Operação

Versão 2.04

ELETRODO UROGINECOLÓGICO

Acessório de uso exclusivo para os equipamentos:
Dualpex 961, Uro 996 e Dualpex 071 (Registro ANVISA nº 80079190022),
PerinaStim (Registro ANVISA nº 80079190021) e
Dualpex Plus (Registro ANVISA nº 80079190030)



*imagens meramente ilustrativas

Fabricante:

QUARK Produtos Médicos

Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos

CNPJ: 71.769.673/0001-59 - Indústria Brasileira

Rua do Rosário, 1776 Piracicaba - SP

CEP 13.400-186

E-mail: quark@quarkmedical.com.br

Telefone: (19) 2105-2800

Número ANVISA: 800.791-9

INTRODUÇÃO

Os eletrodos para tratamento uroginecológico foram desenvolvidos dentro de rigorosos padrões de qualidade, tendo em vista também a preocupação em proporcionar ao paciente o mínimo de desconforto com o máximo de eficácia no tratamento.

INDICAÇÃO

Indicado para o tratamento de períneos dolorosos do pós parto ou pós-operatório, instabilidades vesicais, incontinências sobre imperiosidade, incontinência urinária de esforço, prolapso e disfunções coloproctológicas (eletrodo anal).

- Eletrodo Anal: Indicado para utilização em pacientes virgens (mulheres) ou do sexo masculino.
- Eletrodo Vaginal: Indicado para utilização em pacientes do sexo feminino.

RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se o uso individual deste produto.

O Eletrodo Anal e o Eletrodo Vaginal são partes integrantes dos equipamentos URO 996 e PerinaStim e opcionais para os equipamentos Dualpex 961, Dualpex 071 e Dualpex Plus. Tais equipamentos possuem programas desenvolvidos especialmente para o tratamento uroginecológico.

Recomenda-se portanto, o uso dos eletrodos somente com os equipamentos mencionados.

ATENÇÃO


A QUARK Produtos Médicos não se responsabiliza pelo uso indevido, bem como qualquer alteração e/ou adaptação feita no eletrodo para ser utilizado em outro equipamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (Cx D):

Eletrodo Vaginal - Comprimento 19 cm x Diâmetro 2 cm

Eletrodo Anal - Comprimento 11 cm x Diâmetro 1,4 cm

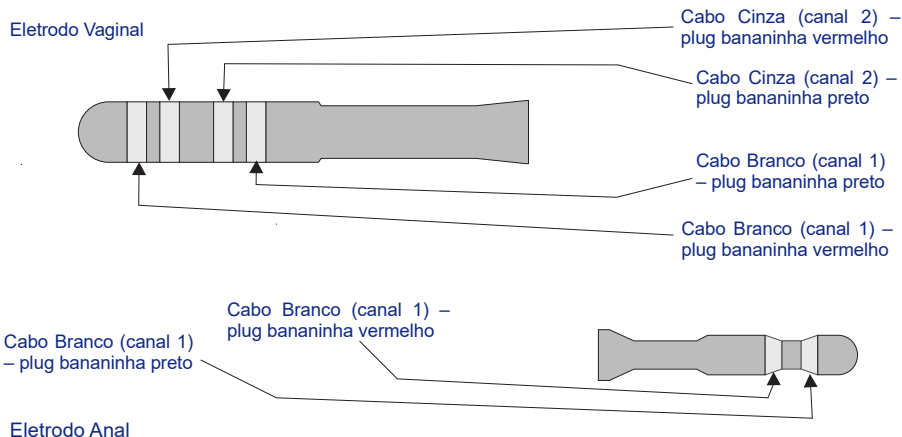

LIMPEZA


Recomenda-se antes e após cada utilização a lavagem do eletrodo com sabonete anti-séptico. Após lavagem, deve ser realizado a limpeza com uma gaze umedecida com álcool 70% em todo o cabo do eletrodo.

IMPORTANTE: No momento da limpeza, deve-se desconectar o eletrodo do equipamento. Produto não esterilizado. Nunca use autoclave.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para a utilização dos Eletrodos é necessário que seja aplicado um gel lubrificante antes da introdução no paciente, que não deve exceder o ponto especificado no desenho da página seguinte.

Atenção: Não introduzir os eletrodos além do ponto delimitado nos desenhos a seguir.

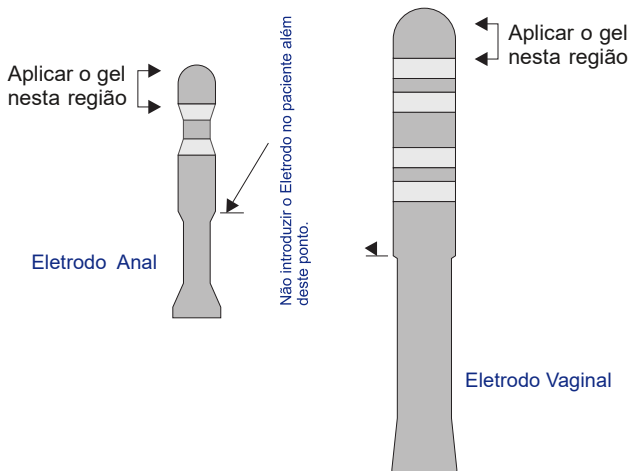


Durante a terapia, o Fisioterapeuta deve segurar o Eletrodo introduzido no paciente.

Atenção: A utilização dos eletrodos é exclusiva para o tratamento uroginecológico.

O **eletrodo vaginal** possui 2 pares de anéis que podem ser utilizados. Os anéis externos são utilizados através do cabo branco e os anéis internos são utilizados através do cabo cinza do eletrodo. Deve-se conectar os cabos do eletrodo aos cabos P2 que estão conectados aos canais de saída do equipamento (cabo branco - canal 1; cabo cinza - canal 2). Os canais podem ser operados simultaneamente ou individualmente.

O **eletrodo anal** possui 1 par de anéis. Deve ser utilizado através de seu cabo branco conectado ao cabo P2 que está conectado ao canal de saída do equipamento (cabo branco - canal 1).

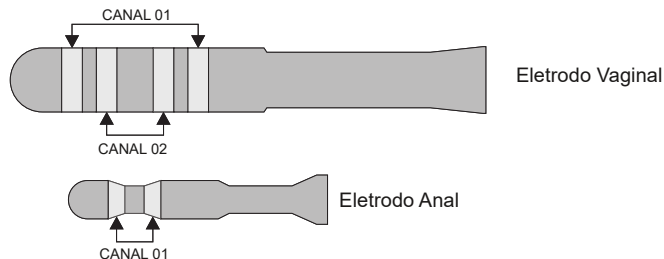

Observação 1: O equipamento PerinaStim possui apenas 01 canal, portanto para o eletrodo vaginal os anéis internos e externos não podem ser utilizados simultaneamente. O eletrodo vaginal pode ter seu cabo cinza conectado ao cabo branco do PerinaStim sem perda de eficiência na terapia.

Observação 2: Devido a melhoria contínua de nossos produtos, a QUARK se reserva ao direito de alterar seus produtos sem incorrer em obrigação alguma de aviso prévio ou atualização em produtos já fabricados.