

## Importante

O presente documento serve apenas para simplificar e clarificar os passos para o correto funcionamento do equipamento. **No entanto, continua a ser crucial a leitura do manual do usuário.** Caso necessário, solicite a versão impressa ou por meio eletrônico (e-mail, WhatsApp, entre outros).

## Manual

Baixe a versão mais recente do manual diretamente no site da Quark Medical:

[quarkmedical.com.br/pdf/FAMILIA\\_FESVIF\\_TENSVIF.pdf](http://quarkmedical.com.br/pdf/FAMILIA_FESVIF_TENSVIF.pdf)


**OBS: A leitura do manual do usuário é imprescindível para boas práticas de uso.**

## Atenção

**Certifique-se que não há divergências nos acessórios que compõem o equipamento, verificando o checklist (disposto na parte interna da embalagem)**

## Instruções Gerais para Uso

**1-** A utilização do equipamento somente deve ser feita pelo Fisioterapeuta ou por profissional treinado e orientado por ele.

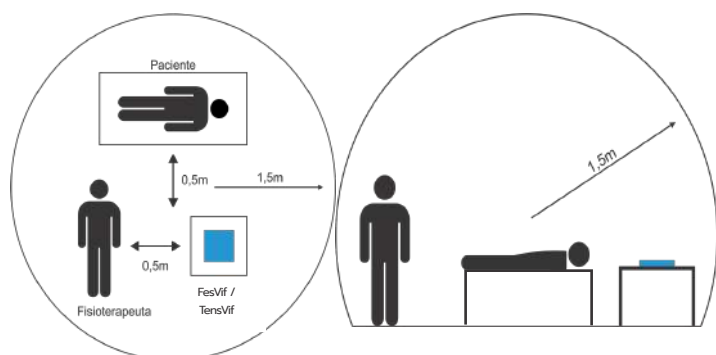


**2-** Conecte o cabo de força no equipamento e o plug na tomada da rede elétrica. Não há necessidade de verificar a tensão da rede elétrica (117V ou 220V), pois o equipamento fará a seleção da voltagem automaticamente.

**3-** Ligue o equipamento através da chave Liga/Desliga. A mensagem com o nome do equipamento e revisão do software aparece no display. Durante este processo, ouve-se o som da campainha.

Versão do Guia Rápido **Família FesVif:** v1.1



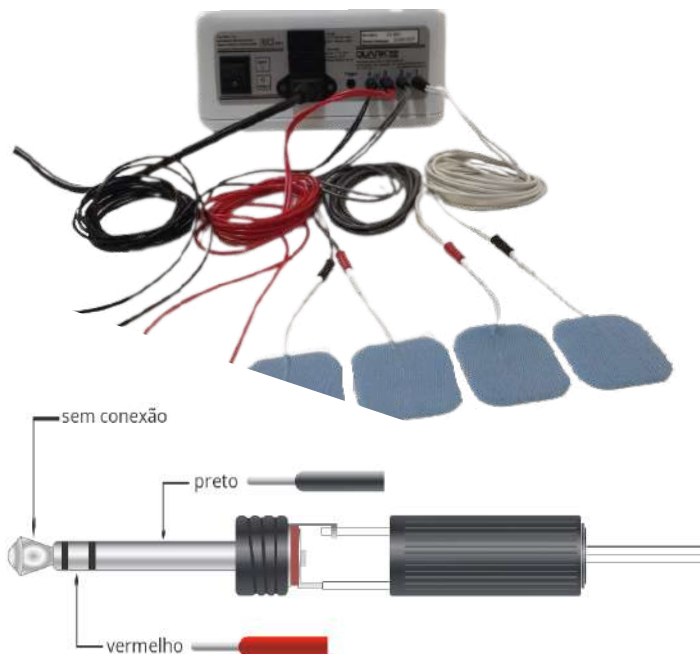


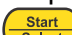
**4-** Conecte os cabos de terapia nos respectivos conectores de saída do equipamento. Nos modelos **Dual:** cabo branco - canal 1 e cinza - canal 2. Nos modelos **Four:** cabo branco - canal 1 e cinza - canal 2, vermelho - canal 3 e preto - canal 4 e a outra extremidade com os eletrodos ao paciente. No caso do eletrodo de silicone, aplicar uma fina camada de gel na área a ser tratada.




**5-** Selecione os parâmetros desejados utilizando a tecla **Function** (Function) ou então utilize a tecla **(Prog)** (Prog) para selecionar alguma terapia gravada na memória. As terapias estão disponíveis no manual **página 12.**

**6-** Inicie a terapia pressionando a tecla (Start/Select).

**7-** Inicialmente a corrente de saída de todos os canais será zero. Deve-se então elevar gradativamente a intensidade da corrente dos canais utilizando para isto as teclas (Incrementa e Decrementa).

\*Durante a terapia, deve-se pressionar a tecla  para selecionar os canais que deseja modificar o valor da corrente através das teclas incrementa e decrementa  . Os canais que serão ajustados passarão a piscar no display. Pressionando-se repetidamente a tecla , alterna-se entre estes 2 conjuntos (canais 1 e 2 ou então canais 3 e 4).

**8-** Ao final do tempo programado para a terapia, ouve-se o som de finalização e a intensidade de corrente é levada à zero.

**9-** Para interromper a terapia a qualquer momento antes do tempo programado, pressione a tecla  (Stop).



**FesVif 995 Dual**



**FesVif 995 Four**



**TensVif 993 Dual**



**TensVif 993 Four**

Fabricante: Quark Produtos Médicos  
Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos

Indústria Brasileira -

CNPJ: 71.769.673/0001-59

Número ANVISA: 80079190023

Rua do Rosário, 1776 - Centro - Piracicaba/SP

CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800

[www.quarkmedical.com.br](http://www.quarkmedical.com.br)

[quark@quarkmedical.com.br](mailto:quark@quarkmedical.com.br)