

# GUIA RÁPIDO

V 1.6



## Sonda - Exercitador Pré e Pós Parto e Exercitador Pré e Pós Parto Plus

Manual disponível em:  
[quarkmedical.com.br/pdf/EXERCITADOR%20PRE%20E%20POS%20PARTO.pdf](http://quarkmedical.com.br/pdf/EXERCITADOR%20PRE%20E%20POS%20PARTO.pdf)

### INTRODUÇÃO

A sonda exercitador para tratamento uroginecológico foi desenvolvida dentro de rigorosos padrões de qualidade, tendo em vista também a preocupação em proporcionar ao paciente o mínimo de desconforto possível com o máximo de eficácia no tratamento.

A sonda é coberta por uma espessa camada de silicone, presa por anéis de borracha e que permite que a mesma seja inflada e mantida segura no local.

**ATENÇÃO: Antes da aplicação, a sonda deve ser, obrigatoriamente, recoberta por um preservativo (sem lubrificante),** permitindo respeitar o controle da assepsia e evitar toda a contaminação de um paciente para o outro.

**Somente depois da sonda estar recoberta pelo preservativo é que se deve utilizar um lubrificante (externo),** de preferência, o gel lubrificante, para efetuar a introdução.

### RECOMENDAÇÕES

O usuário deve seguir a orientação do profissional da área da saúde. A sonda exercitador é parte integrante do EXERCITADOR PRÉ E PÓS PARTO e do EXERCITADOR PRÉ E PÓS PARTO PLUS. A QUARK Produtos Médicos não se responsabiliza pelo uso indevido, bem como qualquer alteração e/ou adaptação feita na sonda para ser usado em outro equipamento.

### LIMPEZA

Após a utilização, retirar e descartar o preservativo. Lavar a sonda com sabonete antisséptico.

### APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Deve ser usado lubrificante na introdução. Recomenda-se o uso do **Gel Lubrificante Certificado**.

**Atenção:** Antes da primeira utilização verifique se a sonda está apta para uso.

- Acople a sonda na mangueira do insuflador;
- Aperte a pêra apenas uma vez deixando a sonda como nas fotos, sendo o formato recomendado para introdução na paciente;
- \*\*Se, ao apertar a pêra uma vez, o produto apresentar alguma deformidade, recomenda-se a substituição.

- Após a introdução da sonda na paciente, pressione a pera até que o balão atinja o tamanho desejado (não devendo ultrapassar 8 cm de diâmetro);

Não é indicada a utilização da sonda em pacientes que possuam piercing genital feminino.

A sonda deve ser **introduzida no máximo até os anéis de borracha. Pequenas deformações são toleráveis, pois a mesma se adapta a parede vaginal.**


\*Imagens meramente ilustrativas



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sonda Exercitador

Pode haver variações de  $\pm 5$ mm no comprimento.

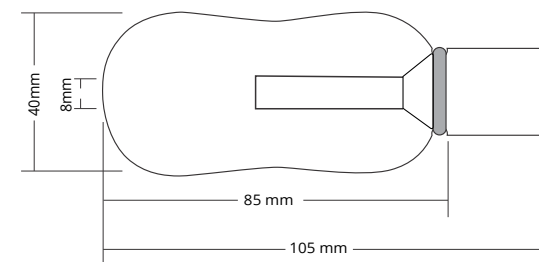

**IMPORTANTE:** Devido a melhoria contínua de nossos produtos, a QUARK se reserva ao direito de alterar seus produtos (cor, formato, etc.) sem aviso prévio, tampouco atualizar produtos já fabricados.

Fabricante: Quark Produtos Médicos  
Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos  
Indústria Brasileira - CNPJ: 71.769.673/0001-59  
Número ANVISA: 80079190029  
Rua do Rosário, 1776 - Centro - Piracicaba/SP  
CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800  
[www.quarkmedical.com.br](http://www.quarkmedical.com.br) | [quark@quarkmedical.com.br](mailto:quark@quarkmedical.com.br)